

## CAMERA DI LAVORO PER OPERAZIONI DI MICROSABBIATURA

# KASKO




### **ATTENZIONE!!!**

*Il plexiglas (Polimetilmetacrilato), specialmente nei bordi tagliati ed incollati, non deve andare a contatto con prodotti a base alcolica. Queste sostanze attivano una reazione chimica che provoca crepe irreversibili.*

### **MESSA IN SERVIZIO**

Sfilare lo schermo di protezione (1) dagli incastrici della camera: tirare prima dalla parte superiore, afferrandolo in corrispondenza degli spigoli laterali, quindi da quella inferiore. Rimuovere le due pellicole di copertura. Collocare la griglia di separazione detriti (3) sul fondo, appoggiarla al frontale, resta inclinata di 15° in modo da creare una intercapedine dove l'abrasivo utilizzato si deposita e non viene sollevato dal getto di aria.

Riposizionare lo schermo: infilarlo prima nella parte anteriore bassa e poi forzarne l'incastrico nella parte posteriore alta. La flangia (8) applicata sulla parete di fondo serve per il collegamento del tubo di aspirazione; i due fori (4), praticati sulle facce laterali a lato dei passaggi per le mani, servono per l'introduzione del tubo del microproiettore. La camera di lavoro è stata studiata per l'abbinamento con PRESSURE BLASTER.

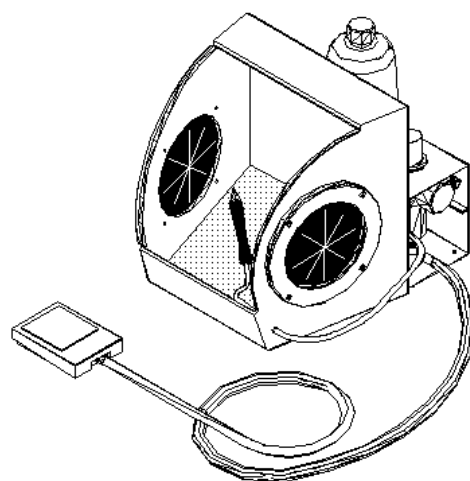


## UTILIZZO

Inserire il particolare da trattare, bloccato in una pinzetta, attraverso le membrane in gomma. In caso venga utilizzato qualsiasi altro strumento che non possa essere montato fisso all'interno della camera, infilare anch'esso attraverso le membrane in gomma.

## PULIZIA

**NON** utilizzare detergenti a base alcolica

## DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI

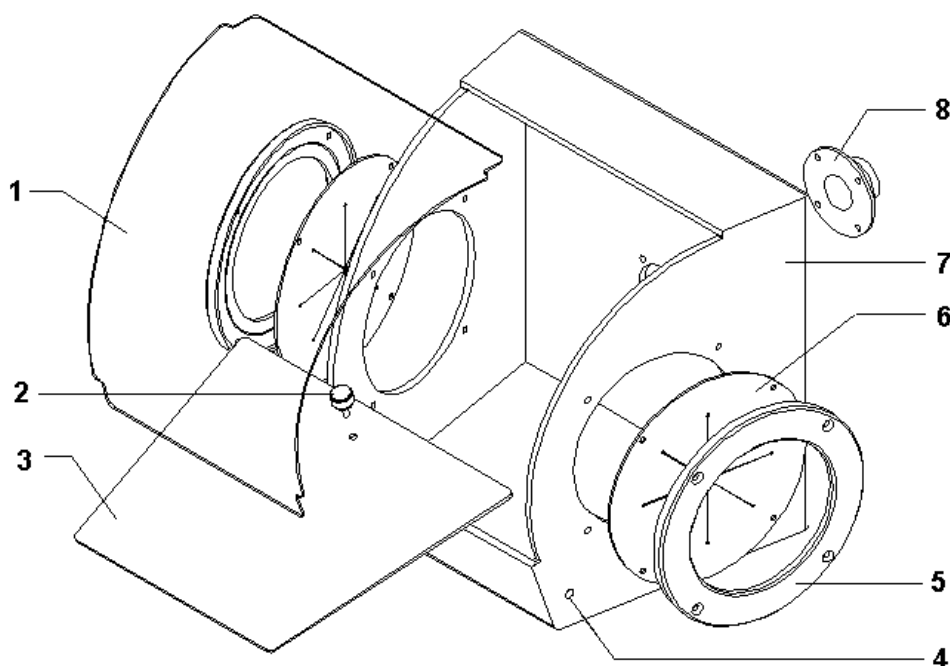

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	1066103	Schermo di protezione
2	NVT151	Pomello maschio M4x10
3	1066102	Griglia di separazione detriti
4	---	Foro per passaggio tubo microproiettore
5	RSB032	Flangia ritenzione membrana in gomma
6	1066107	Membrana in gomma
7	1066101	Camera di lavoro
8	1201007	Flangia collegamento aspiratore

### **DENTALFARM s.r.l.**

Via Susa, 9/a - 10138 TORINO – ITALY

☎ SERVIZIO TECNICO COMMERCIALE (+39) 011/4346588

☎ SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA (+39) 011/4346632

☎ FAX (+39) 011/ 4346366

E-mail: [info@dentalfarm.it](mailto:info@dentalfarm.it) – Website: [www.dentalfarm.it](http://www.dentalfarm.it)